

# BD PureHub™ razkužilni zamašek

## Navodila za uporabo



1  
Odlepite folijo z BD PureHub™ razkužilnega zamaška.



2  
Pričvrstite zamašek na brezigelni konekt s tem, da ga privijete



3  
BD PureHub™ razkužilni zamašek mora biti pričvrščen najmanj eno (1) minuto in lahko ostane na brezigelnem konektu do (7) sedem dni.

## Informacije o proizvodu

Kataloška številka	Opis	Pakiranje
306598	BD PureHub™ razkužilni zamašek	Posamično
306599	BD PureHub™ Multi trak z razkužilnimi zamaški	

**V 1 minuti zmanjša prisotnost bakterij za 4 log (99,99 %)\***  
**Samo za enkratno uporabo. Po uporabi zavržite.**

\*Dokazano zmanjšuje prisotnost najpogostejših povzročiteljev okužb, povezanih z venskimi katetri (CRBSI), vključno s *Acinetobacter baumannii*, *Staphylococcus epidermidis*, *Pseudomonas Aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Candida glabrata* in *Candida Albicans*.

Navojni zamašek ni izdelan iz naravnega gumijastega lateksa ali plastifikatorja diethylhexyl phthalata. Aktivna sestavina: 70 % izopropilni alkohol.

Vedno preberite etiketo.

Vedno upoštevajte tehnike razkuževanja, predpisane v vaši ustanovi.

BD Switzerland Sàrl. Terre Bonne Park – A4. Route de Crassier 17. 1262 Eysins, Switzerland

[bd.com](http://bd.com)

©2019 BD, BD, BD Logo in BD Pure Hub so zaščitene znamke v lasti Becton, Dickinson & Company. 0000CF03429, 1. izdaja

